

رفع آلودگی دستگاه اکومری

(*Trans Esophageal Echo Cardiography*)

تهیه و تنظیم : گل افروزی - انصاری

واحد بهداشت و کنترل عفونت

۱۳۸۹

تعریف :

- این دستگاه درگروه لوازم و تجهیزات **Semicritical** میباشدو چون در تماس با مخاط خواهد بود لذا باید عاری از تمام میکروارگانیسم ها باشد (بجز اسپور تعداد زیادی از باکتری ها) .
- (تجهیزات مورد استفاده در درمان مشکلات تنفسی و تجهیزات بیهوشی مثل لوله داخل تراشه و مدارهای تنفسی ویژه بیهوشی و اندوسکوپ ها ، سسیستوسکوپ ها ، ترمومترها و... در این گروه جای دارند .)
- این گروه از لوازم حداقل به گندزدایی در سطح بالا (**High Level Disinfection**) از طریق پاستوریزه کردن (گندزدایی با آب داغ) یا گندزدایی شیمیایی نیاز دارند . (هر چند که بهتر است استریل شوند)
-

طریقه تمیز کردن و گندزدایی دستگاه اکومری در پایان روز کاری

ابتدا با کمک گازوآب سرد آلودگی روی دستگاه پاک شود ، سپس با آب ولرم و شوینده شسته شده و در محلول کورسولکس پلاس ۳% به مدت ۲۰ دقیقه غوطه ور شود. پس از آن با آب مقطر آبکشی شود و با گاز استریل خشک گردد .

طریقه تمیز کردن و گندزدایی دستگاه اکومری در فواصل بین بیماران

ابتدا با کمک گازوآب سرد آلودگی روی دستگاه پاک شود ، سپس با آب ولرم و شوینده شسته شده و پس از آن با محلول باسیلوس آ اف اسپری شود به طوری که تمام قسمت‌های آن توسط محلول آغشته شود . پس از خشک شدن محلول ، با آب مقطر آبکشی شود و با گاز استریل خشک گردد .